

Schnell und unkompliziert

Der NowCheck[®] COVID-19 Ag Test als nasaler Abstrich

► Die Bezugsgruppen für Corona-Schnelltests beschränken sich längst nicht mehr auf medizinisches Fachpersonal. Deshalb hat die concile den **NowCheck[®] COVID-19 Ag Test** weiterentwickeln lassen: Im Test-Kit befinden sich neben den Tupfern für den Nasen-Rachen-Abstrich ab sofort auch Tupfer für den einfachen Nasen-Abstrich. Die Probe wird damit an der Nasenschleimhaut entnommen statt aus dem tiefer liegenden Nasen-Rachen-Raum – unkomplizierte Durchführung, gleiche Testkassette, gleiche erstklassige Qualität.

Der Antigen-Test weist eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 innerhalb von 15 Minuten zuverlässig nach. Er ist auch eine gute Alternative, wenn ein PCR-Test nicht zur Verfügung steht bzw. eine sinnvolle Ergänzung, weil er durch seine Nachweis-Geschwindigkeit Infektionsketten frühzeitig durchbrechen kann.

- Format: qualitativer Lateral-Flow-Test
- Probe: Nasen-Abstrich oder Nasen-Rachen-Abstrich
- Ergebnis: innerhalb von 15 Minuten
- Sensitivität:* 92,2 %
- Spezifität: 97,3 %
- Packungsgröße: 25er-Box, inklusive aller erforderlichen Bestandteile

* in den ersten 7 Tagen ab Symptombeginn

NEU
auch als
Nasen-
Abstrich



Herausragende Qualität

Geprüft durch das Paul-Ehrlich-Institut und nachweislich einer der sensitivsten Tests am Markt, voll erstattungsfähig



Jederzeit verfügbar

concile ist Partner des Bundesministeriums für Gesundheit für die Versorgungssicherheit mit Antigen-Tests in Deutschland



Einfache Handhabung

Ergebnis in 15 Minuten, kein Labor oder zusätzliche Geräte erforderlich



Erhältlich auf shop.concile.de


Die speziellen Tupfer für den Nasen-Abstrich liegen jeder Bestellung bei

Gleiche Qualität – leichtere Durchführung

Der Nasen-Abstrich hat gegenüber dem Nasen-Rachen-Abstrich einen entscheidenden Vorteil: die unkomplizierte Durchführung auch für nicht medizinisches Fachpersonal. Die Probennahme mittels Nasen-Abstrich beeinflusst jedoch nicht die herausragende Leistungsfähigkeit unseres Testes. Sowohl der Hersteller als auch unabhängige Evaluierungen bestätigen, dass die Ergebnisse von Nasen-Abstrichen mit denen von Nasen-Rachen-Abstrichen übereinstimmen.

Beides im Lieferumfang enthalten

Tupfer Nasen-Abstrich
Tupfer Nasen-Rachen-Abstrich

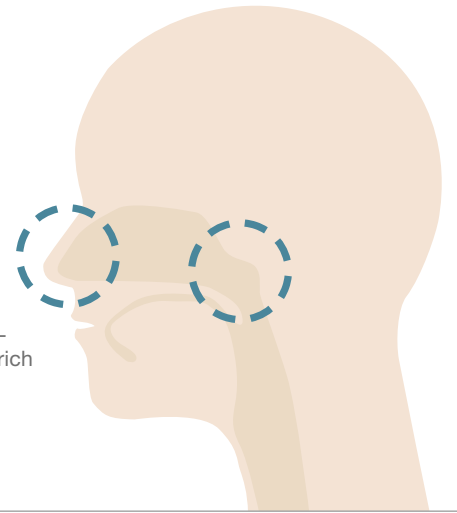

Wir setzen auf den Nasen-Abstrich

Weil er im Vergleich zu anderen Verfahren zuverlässig und alltagstauglich zugleich ist.

■ Nasen-Rachen-Abstrich

Wird manchmal als unangenehm empfunden und ist nur für die Anwendung durch Fachpersonal empfohlen.

■ Rachen-Abstrich

Wird nur bedingt empfohlen, weil darauf zu achten ist, Zähne, Zunge und Gaumen nicht versehentlich mit dem Tupfer zu berühren.

■ Gurgel- bzw. Speicheltest

Hier sehen einige Wissenschaftler die Gefahr der zu starken Verdünnung durch die Gurgellösung, was sich bei geringer Viruslast auf die Zuverlässigkeit der Testergebnisse auswirken könnte. Außerdem ist sorgfältiges Gurgeln entscheidend für die Aussagekraft des Tests.

■ Sputum-Probe

Ist nur sinnvoll, wenn die Testperson produktiven Husten hat, da die Probe aus den tiefen Atemwegen hochgehustet werden muss. Die Methode ist daher nicht alltagstauglich.


■ Stuhl-Probe

Setzt sowohl Stuhlgang voraus als auch die geeignete Umgebung für die Probennahme. Die Methode wäre vergleichsweise umständlich, würde sie beispielsweise als Routine-Testung im Arbeitsalltag integriert.

Bestellen Sie die 25er-Box
jetzt kostengünstig auf

shop.concile.de



 **Hersteller:**
BIONOTE Co., LTD.
22, Samsung 1-ro 4-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18449,
Republic of Korea

Vertrieb in Deutschland:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany
T +49 (0) 761 151474-0
F +49 (0) 761 151474-19

info@concile.de
www.concile.de


concile 